

# NÁVOD K POUŽITÍ

ZVYŠOVACÍ NÁSTAVCE NA WC

## 575 B

Katalogové číslo:  
575 B, 575 B/Deluxe



**CE**

UM.2023.06 | REV.2024.12

## POUŽITÍ

Nástavec na WC je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní toaletní mísu. Zvýšení standardní mísy nástavcem usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny, zvedání se se z mísy, eliminuje možné riziko pádu, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

## INDIKACE

Uživatel by měl být schopen samostatného sedu na nástavci a mít nezbytné fyzické, vizuální a kognitivní dovednosti pro jeho používání.

## KONTRAINDIKACE

Uživatel by neměl mít poruchu vnímání, koordinace nebo závažnou ztrátu rovnováhy. Nástavec nedoporučujeme používat uživatelům, kteří trpí závažnými psychomotorickými nebo motorickými koordinačními patologiemi, stařeckou demencí, mentálním omezením nebo slabozrakostí a slepotou. V těchto případech je vždy nutné nástavec používat pouze s dopomocí a za přítomnosti odborné asistence!



### POZOR

*V případě alergických reakcí, zarudnutí kůže, popř. vzniku otlaků, neprodleně vyhledejte lékaře.*

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Vždy je potřeba zohlednit fyzické i psychické schopnosti uživatele a jeho individuální potřeby.

Pro co nejbezpečnější používání nástavce vždy upravte prostředí, kde jej budete používat.

Nástavec by měl být nejprve odborně zaměřen a při předání uživateli individuálně nastaven.

Před prvním použitím nástavce si pečlivě přečtěte tento návod a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele. Pokud z důvodu zrakového omezení si není možné návod přečíst, vyžádejte si elektronickou verzi k přečtení softwarovou aplikací nebo osobní instruktáž.

Nástavec používejte vždy jen v souladu s návodem k použití. Za následky způsobené používáním v rozporu s tímto návodem nenes dodavatel žádnou zodpovědnost.

Při instalaci nástavce na toaletu postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 190 kg (viz výrobní štítek na produktu).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 160 kg.

Nástavec nikdy nepoužívejte, pokud je jakkoliv poškozen nebo jsou patrné známky výrazného opotřebení.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástavec k toaletě bezpečně a stabilně připevněn.

Pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.

## POPIS

Nástavec je vyroben z odolného voděodolného polyuretanu. Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability během používání, je tento plastový nástavec ve spodní části vybaven dvěma vymezovacími patkami s gumovými podložkami, které fixují správnou polohu nástavce proti posunutí. K posunu a nastavení bočních vymezovacích patek slouží jistící aretační šrouby. Vpředu má ergonomický výřez pro pohodlnou intimní hygienu. Model 575 B/Deluxe je navíc vybaven poklopem.

















### POZOR


*Obrázky uvedené v návodu slouží pouze k upřesnění pokynů a mohou se od dodávaného výrobku lišit.*

**POUŽITÉ SYMBOLY**

Identifikační a výstražné štítky na nástavci musí zůstat čitelné a nesmí být odstraněny.

V případě nečitelnosti, mechanického opotřebení nebo chybějících štítků ihned kontaktujte dodavatele.

-  **Zdravotnický prostředek**  
Označuje, že daný prostředek je zdravotnický prostředek.
-  **Evropská shoda**  
Označením CE na produktu výrobce prohlašuje, že produkt odpovídá základním požadavkům evropské legislativy na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/745 (MDR).
-  **Katalogové číslo**  
Označuje katalogové číslo výrobce, aby bylo možné zdravotnický prostředek identifikovat.
-  **Sériové číslo**  
Označuje sériové číslo výrobce, aby bylo možné konkrétní zdravotnický prostředek identifikovat.
-  **Čárový kód**  
Unikátní jednotná mezinárodní číselná identifikace produktu.
-  **Viz návod k použití**  
Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití.
-  **Upozornění**  
Označuje, že je nutné, aby uživatel nahlédl do návodu k použití, kde jsou uvedeny důležité výstražné informace, jako jsou varování a upozornění, která z různých důvodů není možné uvádět na vlastním zdravotnickém prostředku.
-  **Maximální nosnost**  
Označuje maximální nosnost uživatele pro bezpečné používání zdravotnického prostředku.
-  **Datum výroby**  
Označuje, kdy byl zdravotnický prostředek vyroben.
-  **Výrobce**  
Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je definován nařízením EU 90/385/EHS, 93/42/EHS a 98/79/ES.
-  **Zplnomocněný zástupce v EU**  
Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství.
-  **Dovozce**  
Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek dováží.
-  **Distributor**  
Označuje subjekt, který zdravotnický prostředek distribuuje.
-  **Přeškrtnutá popelnice**  
Produkt nesmí být vytríděn ani do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu, a je nutné ho odevzdat k ekologické likvidaci v rámci obce nebo dodavateli.

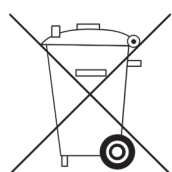**LIKVIDACE**

Ekologická likvidace nástavce se musí provádět podle příslušných národních zákonných ustanovení. Informace o místních firmách zabývajících se likvidací odpadů získáte na místním městském nebo obecním úřadě. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na dodavatele.

## VYBALENÍ NÁSTAVCE A UVEDENÍ DO PROVOZU

Všechny nástavce jsou výrobcem pečlivě kontrolovány a zabaleny pro dodání uživateli. Před tím, než nástavec rozbalíte se ujistěte, že obal není poškozen. Po vybalení nástavce z obalu zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny jeho části, tj. nástavec, aretační šrouby s patkami a víko (*model 575 B/Deluxe*), včetně uživatelské příručky pro bezpečné používání nástavce. Po důkladné kontrole nástavce ho autorizovaný odborník dodavatele nainstaluje, předá uživateli pokyny ohledně důležitých upozornění bezpečného provozu v souladu s tímto návodem a ujistí se, že uživatel těmto pokynům rozumí.



**POZOR**

*Obalový materiál a další různé ochranné části musí být ekologicky zlikvidovány!*

## PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE

Zdvihněte WC prkénko s poklopem a nasadte nástavec na okraje mísy tak, aby s ní byl v co nejtěsnějším kontaktu a dotáhněte boční vymežovací patky (A) aretačními plastovými šrouby (B) tak, aby byl nástavec dostatečně stabilní a nemohl se posunout.




**POZOR**

*Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástavec k toaletě bezpečně a stabilně připevněn. Výška toalety s nástavcem by měla být shodná s výškou podkolenní jamky od země. Při sedu by tak kolenní i kyčelní kloub měl svírat pravý úhel 90°. Optimální výšku nástavce vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme nástavec doplnit madly pro vstávání.*



Připevnění nástavce na mísu.

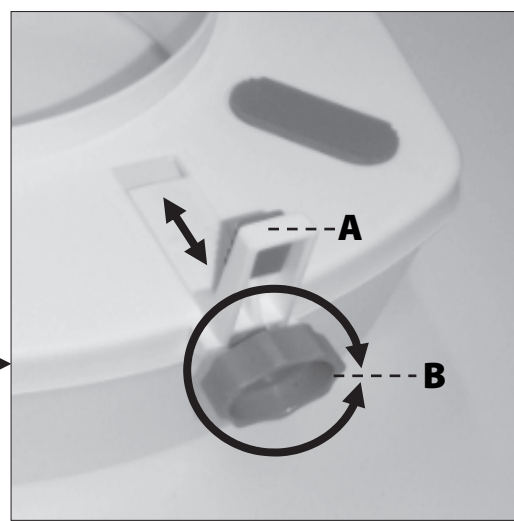

Posunutí vymežovacích patek.

## ÚDRŽBA A SERVIS

Nástavec po každém použití hygienicky ošetřete. Čistěte omytím vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1 min | 85 °C). Pro zachování maximální stability a funkčnosti nástavce doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků včetně gumových podložek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované fixační patky. K opravě je nutné použít pouze originální náhradní díly. V opačném případě zaniká jakákoliv záruka a dodavatel se zříká veškeré zodpovědnosti v případě nehody nebo zranění. Je-li potřeba důkladnější kontrola technického stavu nebo oprava, vždy kontaktujte pouze autorizované servisní středisko, které Vám poskytne veškeré informace a servis. Nástavec skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.