

## Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 2252

**Výrobek:** Vysoké chodítko



Zobrazený model: 2252

### SPECIFIKACE

Hloubka: 77 cm

Šířka: 53 cm

Výška: 83-99 cm

Hmotnost výrobku: 10 kg

Maximální hmotnost uživatele:  
160 kg

### POPIS

Pochromované ocelové chodítko s výškově nastavitelnými nohami a nastavitelnou výškou opěrek na předloktí. Čtyři zadní kolečka s brzdou dovolují uživateli posouvat rámem, aniž by ho musel zvedat, a poskytují mu stabilní platformu, jsou-li zajištěna. Pro skladování a dopravu je možné chodítko složit.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku s dlouhodobou nemocí nebo zotavováním se po poranění či nemoci. Chodítko je určeno jako pomůcka pro uživatele, kterým poskytuje oporu podpaží při chůzi, nejsou-li schopni používat tradiční chodítko. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici. Čtyři otočná kolečka s brzdou umožňují tlačít chodítko při používání směrem dopředu. Kolečka lze zajistit a chodítko pak poskytuje stabilní platformu.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali vhodnost chodítka pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit chodítko opěrky předloktí na správnou výšku a ukázat jeho správné použití.

Při používání se musí uživatel přidržovat rukojetí a opírat předloktí o opěrky. Opěrky nejsou navrženy tak, aby unesly celou hmotnost uživatele. Jsou určeny jako podpora při chůzi. Uživatel musí stát v mezích půdorysu rámu a posouvat jím dopředu vlastním tempem, aniž by jej tlačil. Je možné, že bude potřebná pomoc pečovatele, a to podle úrovně schopností pacienta. Při přesunu na chodítko a z chodítka MUSÍ být aktivovány brzdy.

### NASTAVENÍ

Nastavte výšku opěrek předloktí uvolněním šroubových úchytnů na obou rukojetích, přemístěním do správné výšky a opětovným utažením v požadované poloze. Před použitím zkontrolujte, zda jsou oba šrouby dotaženy a nastaveny na stejnou výšku.

V dolní části každé nohy jsou pružinová tlačítka, která umožňují nastavit každou nohu na příslušnou výšku.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na chodítku.</p>	<p>Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny nohy ve stejné výšce a že jsou pružinová tlačítka před použitím ve správné pozici a zajištěna.</p> <p>Chcete-li chodítko složit, uvolněte dva ruční knoflíky na přední straně sloupků chodítka tak, aby se chodítko dalo složit. Při opětovném rozkládání do polohy pro použití utáhněte ruční knoflíky a zajistěte tak chodítko před použitím ve správné pozici.</p> <p><b><u>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ</u></b></p> <p>Uživatel musí být dostatečně silný, aby tlačil pomůcku dopředu a udržoval rovnováhu. Vhodné pouze pro použití v interiéru a na rovných plochách. Budte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše. Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani na eskalátorech. Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky bez patřičné asistence. Před použitím se vždy se ujistěte, že je chodítko vyrovnané a vyvážené. Na rámu nepřenašejte tašky ani ostatní předměty.</p> <p>Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu.</p> <p>Otočná kolečka se musejí volně otáčet. Pokud se některý upevňovací prvek uvolní, přestaňte chodítko používat.</p> <p><b><u>ČIŠTĚNÍ</u></b></p> <p>K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.</p> <p><b><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u></b></p> <p>Rám výrobku (kromě koleček) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.</p> <p>Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><b><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u></b></p> <p>Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------