



Návod na použití BA-7171 (nafukovací umyvadlo na mytí hlavy)

**Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití.
Tento návod je pouze vodítkem.**

ÚVOD

Nafukovací umyvadlo na mytí hlavy je navrženo tak, aby usnadňovalo mytí vlasů v posteli. Speciálně navržené umyvadlo na mytí hlavy je bezpečné, tvarově přizpůsobené umyvadlo, o které lze pohodlně opřít krk a ramena pacienta. Praktická vypouštěcí hadice účinně odstraňuje z umyvadla mýdlovou pěnu a vodu. Provedení dvou hlubokých vzduchových komor zabraňuje stříkání a rozlití.

SPECIFIKACE

Velikost nafouklého umyvadla	Velikost vyfouklého umyvadla	Hmotnost	Materiál
710 x 610 x 150 mm	660 x 585 mm	750 g	PVC

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Nafoukněte umyvadlo ústy nebo vzduchovou pumpou (není součástí dodávky).
2. Umístěte jej pod hlavu pacienta
3. Pro větší pohodlí pacienta umístěte mezi ramena a umyvadlo ručník.
4. Umyjte vlasy jako obvykle.
5. Vlasy dobře opláchněte a vodu vypusťte do kbelíku.
6. Umyvadlo na mytí hlavy vymyjte a nechejte několik hodin schnout.

VAROVÁNÍ

- Teplotní tolerance je pod 50 °C.
- K nafukování nikdy nepoužívejte kompresor, aby umyvadlo neprasklo.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.

ÚDRŽBA

Umyvadlo na mytí hlavy je navrženo tak, aby jeho údržba byla co nejméně náročná.
Otřete jej a osušte ručníkem. Pokud jej nepoužíváte, uložte jej.





Návod k použití BA-7172 (Mobilní sprchový set)

Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití.

Tento návod je pouze vodítkem.

ÚVOD

Mobilní sprchový set je ideálním výrobkem pro pečovatele, který pomáhá s mytím pacientů, aniž by se pacienti museli zvednout z postele. Sprchový set může být zavěšen na straně postele. Sprchová hlavice je vybavena vypínačem, takže uživatel má plnou kontrolu nad průtokem vody.

Může se používat s nafukovacím umyvadlem na mytí hlavy jako pomůcka pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko nebo invalidní pacienty při mytí hlavy bez nutnosti zvedat je z postele.

SPECIFIKACE

Kapacita	Délka hadice	Hmotnost	Materiál
20 lb	2030 mm	600 g	PVC

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Standardní přívod vody: stiskněte vypínač on/off pro spuštění přívodu vody; uvolněním vypínače on/off zastavte přívod vody.
2. Pro nepřetržitý přívod vody: stiskněte vypínač on/off a mírným zatlačením směrem dopředu jej zajistěte, uvolněte vypínač on/off pro spuštění přívodu vody.

VAROVÁNÍ

- Naplňujte pouze teplou nebo studenou vodu, neplňte horkou vodu.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.
-

ÚDRŽBA

Po použití vypusťte vodu a zavěste vak tak, aby vyschnul. Před uskladněním se ujistěte, že je vak suchý. Sprchovací hadici neskládejte.

